

Массажный стул Calmer MC006

Руководство по сборке и эксплуатации



Меры предосторожности

1. Периодически проверяйте стул перед использованием. Убедитесь, что все винты надежно закреплены, а трос не поврежден и не изношен. Убедитесь, что в металлической конструкции нет трещин.
2. Не перегружайте стул сверх рекомендуемого предела веса. Это может привести к серьезным травмам пользователя. Максимальная нагрузка составляет 120 кг.
3. Не используйте чистящие средства на спиртовой основе при чистке поверхности. Это может привести к повреждению винилового материала. Используйте теплую мыльную воду и вытирайте насухо.
4. При использовании стула убедитесь, что все четыре ножки находятся на одном уровне. Использование ножек на разных уровнях может привести к неустойчивости стула и травмам.
5. Не позволяйте детям собирать или разбирать массажный стул без присмотра.
6. Будьте осторожны при использовании острых предметов, так как они могут проколоть покрытие. Держите обивку стула подальше от контакта с острыми предметами.

Список деталей

1. Подголовник+ подушка	5. Основание сидения
2. Подушка для упора грудной клетки	6. Подставка для ног
3. Сидение	7. Основание подставки для рук
4. Подставка для рук	

