


Меры предосторожности


1. При сборке убедитесь, что все винты зафиксированы и фиксирующий трос не порван и не изношен. Убедитесь, что нет трещин на алюминиевой структуре.
2. Не перегружайте стол за пределами рекомендованного веса пользователя. Это может привести к серьезной травме пользователя. Данный продукт протестирован при максимальной рабочей нагрузке 250 кг.
3. Не используйте чистящие средства, на основе спирта при чистке винилового покрытия. Это может привести к повреждению винилового материала. Используйте теплую мыльную воду и вытрите насухо.
4. Убедитесь, что при использовании стола все четыре ножки находятся на одном уровне. Использование ножек на разных уровнях может привести к неустойчивости стола и к травме.
5. Не позволяйте детям собирать или разбирать массажный стол, если они не под наблюдением.
6. Будьте осторожны при использовании острых предметов, поскольку они могут повредить покрытие. Держите покрытие стола подальше от контакта с острыми предметами.

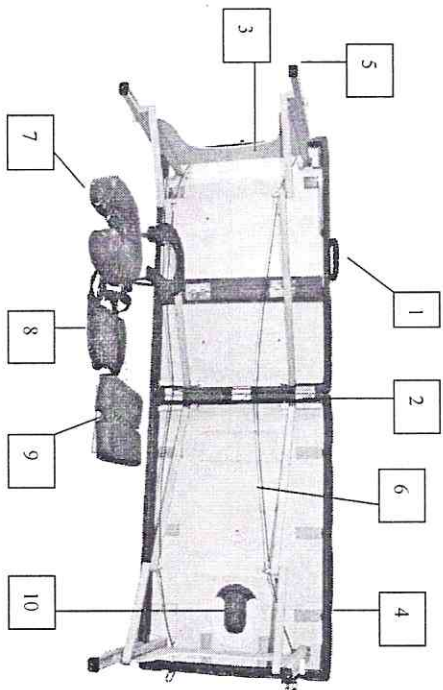

1. Ручка
2. Петля
3. Торцевая пластина
4. Выходное отверстие
5. Резиновый наконечник
6. Трос
7. Подголовник
8. Подголовник
9. Боковые подлокотники
10. Отверстие для лица

Сборка стола

Этапы сборки:

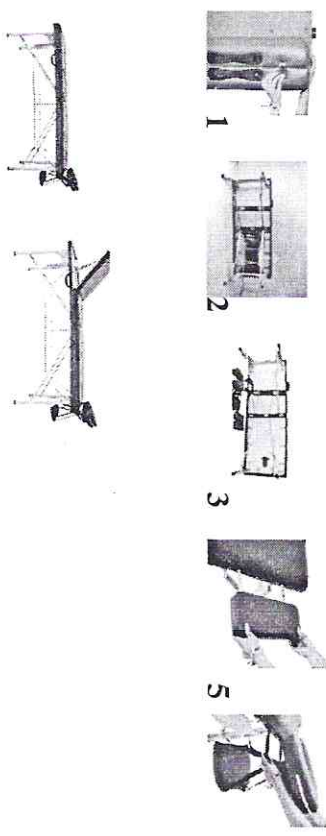

1. Расстегните застёжку.
2. Подожмите стол на бок на пол, откройте стол с четырьмя максимально вытянутыми ножками.
3. Достаньте все принадлежности и затем поднимите стол вверх, пока ножки не встанут на пол.
4. Вставьте каркас подголовника в соответствующие отверстия и разместите подушку подголовника в каркас.
5. Наденьте подголовник, затем вставьте подлокотники с обеих сторон стола в отверстия.
6. Стол готов к использованию.

Высота стола регулируется с помощью кнопок на ножках. Все четыре ножки должны быть отрегулированы таким образом по очереди. Убедитесь, что все ножки отрегулированы на одинаковом уровне высоты.