

Массажный стол Calmer Grotto Two

Инструкция по эксплуатации



Меры предосторожности

1. Периодически проверяйте стол. Убедитесь, что все винты закручены плотно, а трос не поврежден и не изношен. Убедитесь, что на алюминиевой конструкции нет трещин.
2. Не перегружайте стол сверх рекомендованной нормы. Это может привести к серьезным травмам пользователя. Данный продукт протестирован при максимальной рабочей нагрузке 250 кг.
3. Не используйте чистящие средства на спиртовой основе при чистке винила. Это может привести к повреждению винилового материала. Используйте теплый мыльный раствор и вытрите насухо.
4. При использовании стола убедитесь, что все четыре ножки находятся на одном уровне. Использование ножек на разных уровнях может привести к неустойчивости стола и травмам.
5. Не позволяйте детям собирать или разбирать массажный стол за вас без присмотра.
6. Будьте осторожны при использовании острых предметов, так как они могут проткнуть обивку. Не допускайте контакта покрытия стола с острыми предметами.



1. Ручка 2. Медная кнопка 3. Крепление 4. Подвесной подлокотник
5. Подголовник 6. Трос 7. Боковые опоры

Сборка стола

Этапы сборки:



1. Расстегните застёжку.
2. Положите стол на бок на пол, откройте стол с четырьмя максимально вытянутыми ножками.
3. Достаньте все принадлежности и затем поднимите стол вверх, пока ножки не встанут на пол.
4. Вставьте каркас подголовника в соответствующие отверстия и разместите подушку подголовника в каркас.
5. Наденьте подголовник, затем вставьте подлокотники с обеих сторон стола в отверстия.
6. Стол готов к использованию.

Высота стола регулируется с помощью кнопок на ножках. Все четыре ножки должны быть отрегулированы таким образом по очереди. Убедитесь, что все ножки отрегулированы на одинаковом уровне высоты.

Складывание и транспортировка стола



1. Снимите все аксессуары.
2. Положите стол на бок.
3. Положите все аксессуары под эластичные фиксирующие тросы под верхний шпон.
4. Сложите стол и зафиксируйте застежку.
5. Положите массажный стол в сумку для переноски.

Носите стол как чемодан, взявшись за ручку.

Внимание: Если рама/ножки/конструкция стола повреждены в каком-либо месте, вам не следует использовать стол. Использование стола с повреждениями может причинить вред или серьезные травмы для вас или вашего пациента. Следует немедленно устранить все неполадки.